

# Minivette® POCT


POCT(ポイントオブケアテスト)のための微量血液の採取・分注に




## Minivette採血管

- 毛細管現象による簡単な採血
- 微量の血液の正確な分注
- テストカードなどへの簡単な注入
- 分注容量 : 10 $\mu$ l, 20 $\mu$ l, 50 $\mu$ l, 100 $\mu$ l, 200 $\mu$ l


## 使用方法

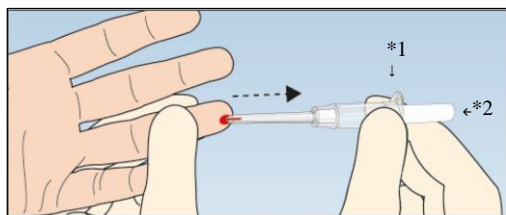


**1** ランセット等で皮膚穿刺します。Minivette採血管のつば\*1の少し下を持ち水平に保持します。ピストン上部の空気穴\*2を塞がず、またピストンを押さないようにします。空気が入らないように採血管の先端から血液を採取します。

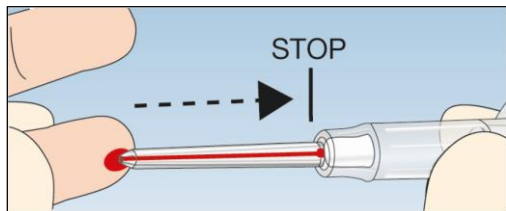

**2** 採血管の先端からフィルターまで血液が達した時点で採血は完了です。

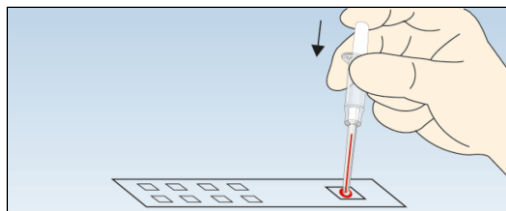

**3a** 採血管をテストカード等にセットし、ピストン上部の空気穴を塞ぎながらすべての血液を分注するようにゆっくりと押し込みます。

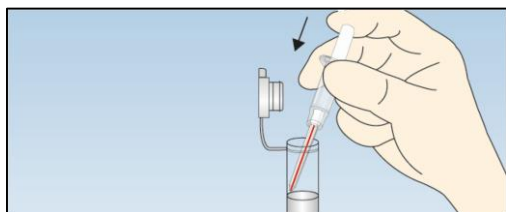

**3b** もしくは、マイクロチューブに血液を分注します。

※血液サンプルは潜在的な感染性を考慮して、必ず手袋着用の上作業してください。

## オーダーインフォメーション

Art.No.	製品名	添加剤	カラーコード	数量	分注容量
17.2111.010	Minivette採血管 POCT 10μl	なし	白	200本	10μl
17.2111.020	Minivette採血管 POCT 20μl	なし	白	200本	20μl
17.2111.050	Minivette採血管 POCT 50μl	なし	白	200本	50μl
17.2111.100	Minivette採血管 POCT 100μl	なし	白	200本	100μl
17.2111.200	Minivette採血管 POCT 200μl	なし	白	150本	200μl

管理医療機器

一般的名称：開放型採血用チューブ

販売名：Minivette採血管

医療機器承認番号：30500BZX00151000

※ 本製品の使用にあたっては製品の「電子添文」を必ずよく読み、正しくお使いください。  
※ カタログに記載されている情報は、予告なく変更される可能性があります。

製造販売業者 / 販売元

**SARSTEDT**  
ザルスタット株式会社  
URL : www.sarstedt.com

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-16-11  
内神田渋谷ビル8F  
TEL:03-3526-3530 FAX:03-3526-0870

**大阪営業所**  
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-43  
ファサード江坂ビル7F  
TEL:06-6339-6886 FAX:06-6339-8976

**福岡営業所**  
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8  
住友生命博多ビル12F  
TEL:092-433-3600 FAX:092-433-3601

取扱店  **正晃株式会社**  
SEIKO <http://seikonet.jp/customer/>

福岡第一営業所 (092)611-8131	宮崎営業所 (0985)27-1331
福岡第二営業所 (092)611-5335	鹿児島営業所 (099)260-7133
福岡西営業所 (092)330-6060	長崎営業所 (0957)49-2780
北九州営業所 (093)671-8006	沖縄営業所 (098)888-3666
久留米営業所 (0942)45-1331	山口営業所 (083)972-0215
大分営業所 (097)558-0025	下関配送センター (083)248-3862
佐賀営業所 (0952)22-7841	海外営業所 (092)611-5570
熊本営業所 (096)380-0055	東京支店 (03)5947-6680